

# COVID-19検査 唾液採取手順

## 検査キット



### ※注意

唾液以外の検体採取には使用しないでください。  
漏斗ふた部分には安全液が入っています。  
安全液が目に入ったり、皮膚に付着した場合は水で十分洗い流してください。

唾液採取キット

唾液用検体採取キット 内容物

## 唾液採取前 注意事項

- ・ 検体採取前の30分間は、**飲食、喫煙およびガムを噛むことはお控え**ください。
- ・ 飲食した後に検体採取を行う場合、**歯磨きを行い、最低10分以上時間をあけて**検体を採取してください。
- ・ 検体採取直前に咳をする、鼻をすするといった行為は控えて下さい。


## 唾液採取手順

①  チューブに示される黒いラインまで唾液を吐きだしてください。  
採取量は1 ml以下です。

②  片方の手でまっすぐチューブを持ち、もう片方の手で漏斗のふたをしっかりと押し下げて閉めて下さい。  
蓋がしっかりとしまっていることを確認してください。

③  チューブをまっすぐもったまま、漏斗をねじってチューブから外してください。  
注) 漏斗を外す際、唾液が手に付着する事があるので、注意してください。

④  チューブ用小キャップでチューブをしっかりと密閉します。  
注) きちんと蓋が閉まっていないと液が漏れるので気を付けて下さい

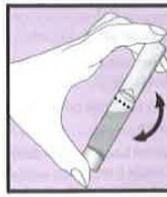⑤  チューブを5秒間振ってよく混ぜて下さい。

⑥ 検査キット同封のアルコール綿でチューブの外側を拭きます。


⑦ チューブ側面に油性マジックで**氏名(ローマ字)、生年月日**を記載してください。→裏面に続く

# COVID-19検査 梱包手順

## 梱包に使用するもの




検査依頼書

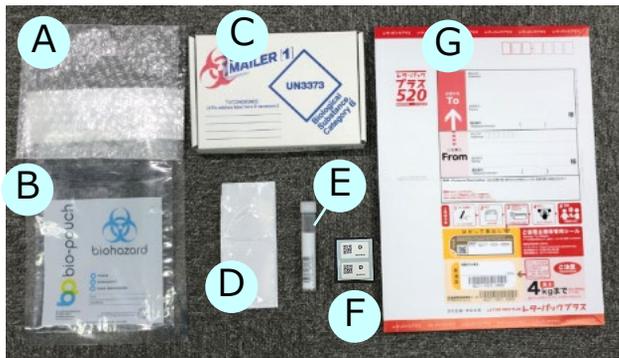

- A: 緩衝材袋
- B: バリアパウチ
- C: 厚箱 (3次容器)
- D: 吸湿材
- E: 唾液チューブ (検体採取キット)
- F: 二次元バーコード
- G: レターパック

## 梱包手順


- ① 唾液チューブ(E)と検査依頼書に  
二次元バーコード (F)を貼って下さい。

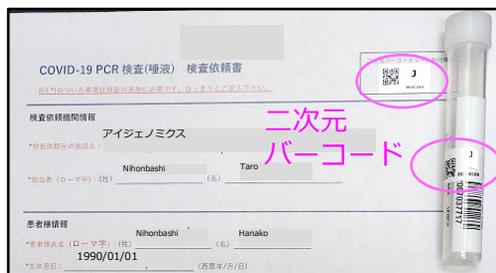

- ② 唾液チューブ(E)を吸湿材(D)と重ねて緩衝材 (A)に入れて下さい。



- ③ バリアパウチ(B)の口を開け、緩衝材袋に入った唾液チューブ+吸湿材のセットを入れて下さい。

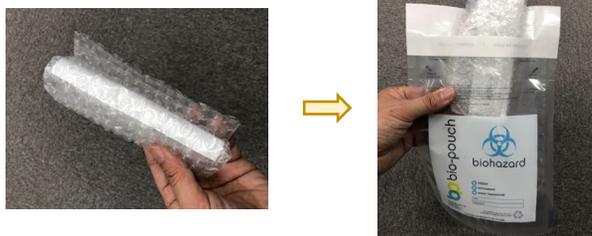


- ④ バリアパウチの剥離紙を剥がして下さい。  
折り線で手前に曲げ、バリアパウチをぴったりと重ねて下さい。



- ⑤ バリアパウチを厚箱(C)に入れて下さい



- ⑥ 検体を入れた厚箱と検査依頼書を  
レターパック(G)に入れて下さい。

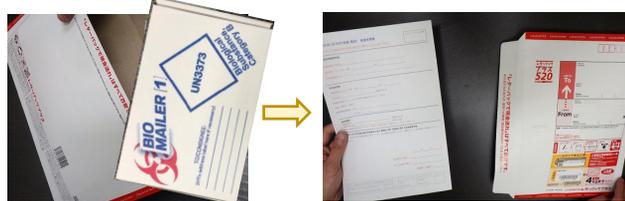

※レターパックを使用する前に必ず  
ご依頼主情報をご記入ください

- ⑦ レターパックの封をして  
ポストに投函して下さい。

