

▲ エンドメトリオの
動画はこちらから。

検査内容

子宮内膜着床能検査

ERAは子宮内膜着床能を調べ、
胚移植に適切なタイミングを
評価・解析します。

子宮内膜着床能

子宮内膜 マイクロバイオーーム検査

子宮内の細菌を調べる検査で、妊娠
に悪影響を及ぼす16種類の病原性
細菌がいるか、またそれを防止する
ラクトバチルスが十分存在してい
るかを確認します。子宮内が妊娠に
とって最適な環境であるかどうか
を評価するために役立ちます。

子宮内膜細菌叢



感染性慢性子宮内膜炎検査

ALICEは慢性子宮内膜炎と関連が
ある細菌を検出します。

慢性子宮内膜炎原因菌

Igenomix[®]
PART OF VITROLIFE GROUP[™]

株式会社アイジェノミクス・ジャパン

〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目3-1 留園ビル 2F
WEB : www.igenomix.jp

2025-0044JP



EndomeTRIO

子宮内膜が教えてくれること



ERA[®]

子宮内膜着床能検査



EMMA

子宮内膜
マイクロバイオーーム検査



ALICE

感染性慢性
子宮内膜炎検査



Igenomix[®]
PART OF VITROLIFE GROUP[™]

子宮内膜の状態を知るために

EndomeTRIO

子宮内膜が教えてくれること



ERA[®]

子宮内膜着床能検査



EMMA


子宮内膜
マイクロバイオーーム検査



ALICE

感染性慢性
子宮内膜炎検査

EndomeTRIOは3検査を同時に解析

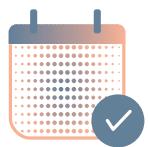

ERA[®]

子宮内膜着床能検査

健康な胚を移植しても、子宮内膜の状態によっては着床に至らないことがあります。

子宮内膜は、一定のサイクルで胚を受け入れるための準備を行います。胚にとって最も着床しやすい子宮内膜環境が整う期間は「着床の窓」と呼ばれます。

ERA検査でご自身の「着床の窓」を調べることで、着床率が最も高まる胚移植のタイミングを知ることができます。

ERA検査により妊娠率が約25%向上することが報告されています。*



ERAの動画はこちらから。▶

*Ruiz-Alonso et al. Fertil Steril. 2013. Simon et al. Fertil Steril. 2016.



EMMA

子宮内膜 マイクロバイーム検査

子宮内膜の健康は妊娠に不可欠なものです。

健康な子宮内膜にはラクトバチルス(乳酸桿菌)が豊富に存在します。

EMMA検査は子宮内膜の菌の種類と量をより正確に把握し、適切な治療を導くことで、妊娠の可能性を高めます。

ラクトバチルスが豊富であることは、胚移植の成功率と相関があることが知られています。*

最適な子宮内環境にある患者さんでは、着床率、妊娠率、および出産率が高まることが報告されています。*



EMMA & ALICEの動画はこちらから。▶

*Moreno et al.
Am J Obstet Gynecol 2016; 215(6):684-703



ALICE

感染性慢性 子宮内膜炎検査

慢性子宮内膜炎は、不妊の原因の一つです。この疾患は子宮内膜の炎症を引き起こしますが、ほとんどの場合自覚症状がありません。

従来の方法では病原性細菌を正確に検出することができず、広域な抗生物質が処方されていました。

ALICE検査は慢性子宮内膜炎の病原性細菌を高感度に検出します。ALICE検査の結果から、医師は抗生物質やプロバイオティクス等による適切な治療を選択します。

不妊症患者の約30%が慢性子宮内膜炎に罹患していると言われています。*
中でも、反復着床不全、反復性流産の方では罹患率は66%に上ると言われています。**

*Moreno et al. Am J Obstet Gynecol 2018; 218(6):602.e1-602.e16

**Cicinelli et al. Reprod Sci 2014; 21(5):640-7.
Cicinelli et al. Hum Reprod, 2015; 30(2):323-30.

よくある質問

Q 3つの検査を同時に受ける時は、3回生検を行う必要がありますか？

A 1度の検体採取のみで3つの検査を受けることができます。

Q 検査の際には、どのような処置を行いますか？

A 子宮内に細い管のようなものを挿入し、子宮内膜の一部を採取いたします。

Q 検査は痛いですか？

A 子宮体がん検診に似ているという声が多いですが、個人差があります。鎮痛剤や麻酔のご使用については、担当医とご相談ください。

Q 検査結果はどのくらいでわかりますか？

A 弊社に検体が到着してから、3週間以内に、結果をクリニックへお戻しいたします。

Q 検査費用はどのくらいかかりますか？

A 詳細はクリニックにお尋ねください。

Q 体調や食事などの要因で着床の窓が変わることはありますか？

A 検査を受けられてから3年程度は変わらないと推定されますが、体重の増減によってBMIが大きく変わった場合は変化する可能性があります。

Q 検査を受ける周期に性交渉を行っても良いですか？

A 問題ありません。

エンドメトリオ三姉妹が
子宮内膜と妊娠率の関係を
動画で詳しくご紹介致します！

